

ステアプロ

# エタノールクロス

医療  
介護施設用

頻繁に触れるところに。手軽な除菌清掃を。

汚れ・菌・ウイルスもしっかり除去※1  
コンタクトポイントから、血液汚れまでキレイに



含浸液は**食品原料**と  
**精製水**を使用



※1  
除菌

※1  
ウイルス  
除去



80枚入り  
(シート寸法:14×20cm/枚)



つめかえ用  
(80枚入り)

アルコール臭の  
広がりが少ないので  
いつでも手軽に  
使えます※2


※1 全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。 ※2 80%の高濃度アルコールと比較した場合

# メディプロ エタノールクロス


医療  
介護施設用

## 汚れ・菌・ウイルスをしっかりと拭き取り除去する\* 環境清掃シート

### ●洗浄性能試験

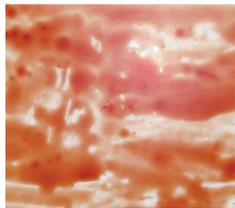

未洗浄

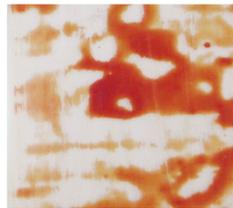

エタノール80%含浸シート



メディプロエタノールクロス

汚垢：ヒツジ血液をPP板に塗布後、乾燥したものをモデル汚垢板とした。洗浄：シート2枚で拭き取り後自然乾燥

徹底洗浄が  
求められる  
血液汚れにも  
効果的！



### ●ウイルス除去試験\*

	ウイルスA (非エンペロブタイプ)		ウイルスB (エンペロブタイプ)	
	ウイルス数 (TCID50/試験担体)	除去効果(%)	ウイルス数 (TCID50/試験担体)	除去効果(%)
乾燥直後	1.5×10 <sup>6</sup>		2.4×10 <sup>7</sup>	
エタノールクロスで 拭き取り後	3.3×10 <sup>3</sup>	99	2.4×10 <sup>4</sup>	99.9

### ●除菌試験\*

	グラム陰性桿菌A		グラム陽性球菌B	
	菌数 (cfu/試験担体)	除去効果(%)	菌数 (cfu/試験担体)	除去効果(%)
乾燥直後	2.0×10 <sup>7</sup>		9.4×10 <sup>6</sup>	
エタノールクロスで 拭き取り後	2.0×10 <sup>1</sup>	99.9999	2.4×10 <sup>4</sup>	99

試験機関：(一財)北里環境科学センター 北環発2016.0021号(2016年8月10日発行) 北生発2016.0134号(2016年8月3日発行)

〈試験方法〉各種菌、ウイルス液を接種、乾燥させたプレートを試験品にて5往復拭き取り後、残存菌、ウイルスを回収し、測定した。

※除去効果：(a-b) a×100 a:乾燥直後の菌数、ウイルス数 b:試験資料で拭き取り後の菌数、ウイルス数

\*すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。

### 【ユーザーの声】

ベッド・手すり・ドアノブ・トイレ清掃の  
拭き取り作業に使用している。  
速乾性がありクロスの綿落ちもない点  
が良い。(介護施設A様)

床頭台・ベッドレールなどの軽い汚れは  
簡単に落ちる。  
1枚の大きさ、生地の厚みが丁度よく  
使いやすい。(介護施設B様)

ケアのタイミングでテーブルや椅子など  
に使用しているが、取り扱いが簡単で  
手早く使用できるところが便利。  
(介護施設C様)

### 用 途

- 人の手が触れるドアノブ、手すり、蛇口、テーブルなどの施設内における硬質表面の除菌清掃。
- ベッドの柵、車いす、杖などの看護・介護用品の除菌清掃。(人体には使えません)

### 使えないもの

白木、樹脂(アクリル、ABS)、金属(銅、真鍮などの銅を含む合金)。次のものは目立たない部分で試してからお使いください。変色、シミなどの原因となることがあります。革製品、ゴム材、木材、大理石などの石材、ワックスコートや塗装面。

### ■ 梱 包 内 容

品 名	容量	梱入数	寸 法(mm)		重 量(kg)		個 装 材 質	JANコード
			個装	外装	個装	外装		
メディプロ エタノールクロス 本体	80枚	12	幅 105 高さ 178 奥行 105	幅 433 高さ 196 奥行 326	0.4	5.4	ラベル:紙 ボトル:PP キャップ:PE 中フィルム:PE, M 外装フィルム:PP	4903301253600
メディプロ エタノールクロス 詰替	80枚	20	幅 100 高さ 280 奥行 70	幅 398 高さ 171 奥行 331	0.3	7.1	フィルム:PE, PET	4903301253617

■お問合せ先は

## ライオンハイジーン株式会社

本 社：〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

TEL 03(6739)9050 (大代表) <https://www.lionhygiene.co.jp/>

- このパンフレットは2023年4月現在のものです。  
一部商品仕様等に変更がある場合がございますが、ご了承ください。

無断転載禁止! 他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。