

メディプロ


# エタノールクロス

アルコール含浸シート


医療施設用

手軽にふき取り除菌清掃


ベッドの柵やテーブル

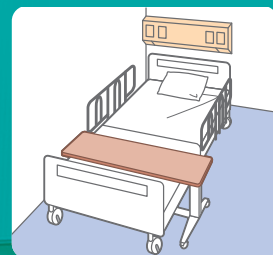

車いすの肘掛けや手押しハンドル

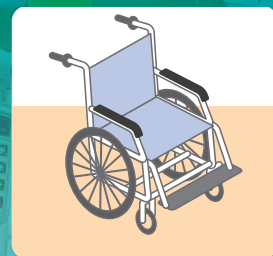


電気スイッチ

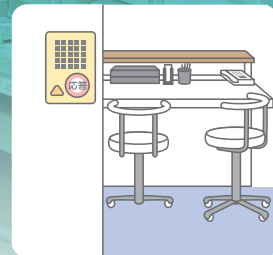

医療従事者、患者、入居者の身のまわりに。  
気になる汚れや菌・ウイルスをサッと拭き取り除去\*。



80枚入り  
シート寸法: 14cm×20cm/枚

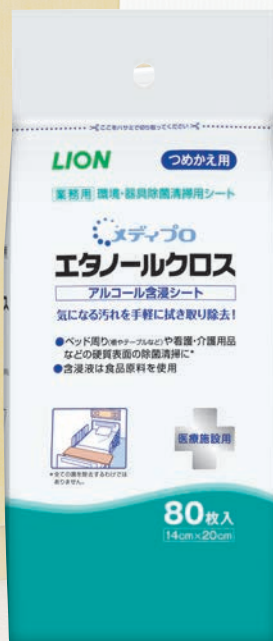

つめかえ用

## 商品特長

- 1 人の手が触れるドアノブ、ベッドの柵、車いすなど、施設内の気になる汚れをサッと拭いて除菌清掃できます。
- 2 80%エタノール含浸製品と比べ、アルコール臭の広がりが少ないため、患者様や入居者様の近くでも手軽に使えます。
- 3 菌とウイルスを拭き取り除去\*。血液汚れにも高い洗浄力を発揮し、しっかり拭き取れます。
- 4 含浸液は食品原料(食品添加物)と精製水を含浸しています。

\*すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。

## ユーザー様からの声

ベッド・手すり・ドアノブ・トイレ清掃の拭き取り作業として使用。速乾性がありクロスの綿落ちもなくて良かった。(介護施設A様)

床頭台・ベッドレールなどの軽い汚れは簡単に落ちた。1枚の大きさ、生地が厚みが丁度よく使いやすかった。(介護施設B様)

手すりを拭く際、手軽に使用できて良かった。(介護施設C様)

ケアのタイミングでテーブルや椅子などに使用したが、取り扱いが簡単で手早く使用できるところが魅力的だった。(介護施設D様)



# エタノールクロス

アルコール含浸シート



エタノールを不織布に含浸した施設環境・器具の清掃用ウエットシートです。(人体には使えません。)


## 洗浄性能

### 洗浄力試験

タンパク変性が少なく、  
血液汚れに対する洗浄性が高い



未洗浄

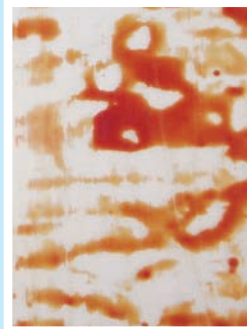

エタノール80%含浸シート



メディプロエタノールクロス

汚垢：ヒツジ血液をPP板に塗布後、乾燥したものをモデル汚垢板とした。洗浄：シート2枚で拭き取り後自然乾燥



本体

つめかえ用

## ● ウイルス除去試験\*

|                | ウイルスA<br>(非エンペロータイプ)   |         | ウイルスB<br>(エンペロータイプ)    |         |
|----------------|------------------------|---------|------------------------|---------|
|                | ウイルス数<br>(TCID50/試験担体) | 除去効果(%) | ウイルス数<br>(TCID50/試験担体) | 除去効果(%) |
| 乾燥直後           | $1.5 \times 10^6$      |         | $2.4 \times 10^7$      |         |
| エタノールクロスで拭き取り後 | $3.3 \times 10^3$      | 99      | $2.4 \times 10^4$      | 99.9    |

試験機関：(一財)北里環境科学センター 北環発 2016.0021号 (2016年8月10日発行) 北生発 2016.0134号 (2016年8月3日発行)

〈試験方法〉各種菌、ウイルス液を接種、乾燥させたプレートを試験品にて5往復拭き取り後、残存菌、ウイルスを回収し、測定した。

※除去効果：(a-b) a × 100 a: 乾燥直後の菌数、ウイルス数 b: 試験資料で拭き取り後の菌数、ウイルス数

\*すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。

## ● 除菌試験\*

|                | グラム陰性桿菌A          |         | グラム陽性球菌B          |         |
|----------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
|                | 菌数<br>(cfu/試験担体)  | 除去効果(%) | 菌数<br>(cfu/試験担体)  | 除去効果(%) |
| 乾燥直後           | $2.0 \times 10^7$ |         | $9.4 \times 10^6$ |         |
| エタノールクロスで拭き取り後 | $2.0 \times 10^1$ | 99.9999 | $2.4 \times 10^4$ | 99      |

### 用 途

●人の手が触れるドアノブ、手すり、ベッドの柵、蛇口などの施設内における硬質表面の除菌清掃。●車いす、杖などの看護・介護用品の除菌清掃。

### 使えないもの

白木、樹脂(アクリル、ABS)、金属(銅、真鍮などの銅を含む合金)。次のものは目立たない部分で試してからお使いください。変色、シミなどの原因となることがあります。皮製品、ゴム材、木材、大理石などの石材、ワックスコートや塗装面。

## ■ 梱 内 容

| 品 名                     | 容量  | 梱入数 | 寸 法(mm)                   |                           | 重 量(kg) |     | 個 装 材 質   | JANコード        |
|-------------------------|-----|-----|---------------------------|---------------------------|---------|-----|---|---------------|
|                         |     |     | 個 装                       | 外 装                       | 個 装     | 外 装 |   |               |
| メディプロ<br>エタノールクロス<br>本体 | 80枚 | 12  | 幅 105<br>高さ 178<br>奥行 105 | 幅 433<br>高さ 196<br>奥行 326 | 0.4     | 5.3 | ラベル : 紙<br>ボトル : PP<br>キャップ : PE<br>中フィルム : PE、M<br>外装フィルム : PP | 4903301253600 |
| メディプロ<br>エタノールクロス<br>詰替 | 80枚 | 20  | 幅 100<br>高さ 280<br>奥行 70  | 幅 398<br>高さ 171<br>奥行 301 | 0.3     | 6.9 | フィルム : PP、PET   | 4903301253617 |

■お問合せ先は

ライオンハイジーン株式会社